



Defibrillátor Plusz

defibrillatorplusz.eu

+36 20 384 1480 | +36 70 614 0921

Szeretnék segíteni, hogy megfelelő defibrillátorok legyenek a tűzoltóautókban is.

Varga Erika
ügyvezető, vezető oktató

Túlélésre akkor adunk esélyt, ha megfelelően nyomjuk a mellkast újraélesztés közben, akkor is, ha kellett elektromos sokkot leadni, és akkor is, ha nem.

Ebben nyújt segítséget a ZOLL AED Plus programja. Nemcsak sokkot tud leadni az EKG analízis után, melyet automatikusan elvégez, ha felhelyeztük az elektródákat, hanem a teljes újraélesztési folyamatot támogatja. Segít nekünk a megfelelő mellkasnyomás kivitelezésében a mellkasra helyezett érzéken keresztül. A túlélés esélye így 80%-kal nagyobb.

Néhány érv mellett, hogy miért A ZOLL AED PLUS a legkönnyebben kezelhető defibrillátor, és néhány előny a többi készülékkel szemben:



- Az AED Plus fedele segítséget nyújt a légutak biztosításához, mivel passzív légútbiztosító eszközként alkalmazható.
- A teljes újraélesztést támogatja és a sokk leadását is (kép-, hang-, kijelző- és fényjelzéssel végig vezet az összes lépésen, míg a többi készülék általában nem).
- Önellenőrzési funkcióval rendelkezik, mely funkció kikapcsolt állapotban is működik!
- A két elektróda egybe van építve, a kompresszió érzéken található kereszt segíti a felhelyezést (a többi készüléknél a különálló elektródák felhelyezése laikus életmentőknek nem teljesen egyértelmű).
- Van mellkasi kompresszió-érzékelő és visszajelző beépítve (nagyon nagy segítség, főleg, ha laikus életmentő kezeli, más készülékeknél ez nem jellemző).
- A ZOLL AED Plus üzemen tartási költsége. **MÁR AZ ELSŐ NÉGY ÉVBEN A BESZERZÉSI ÁR + ÜZEMEN TARTÁSI KÖLTSÉG A TELEPEK TEKINTETÉBEN = AZ EGYIK LEGALACSONYABB.**
- Az elektróda szavatossága 5 év (míg a többi elektróda általában 2 vagy 3 évig szavatós).
- Az új telepek élettartama 5 év készenléti üzemmódban. (10 db lítium elem).
- Ezen felül az **AED PLUS készülékben a 10 telep kapacitása két áramkör között oszlik meg, melyek egymástól függetlenül is képesek 100%-ban ellátni a készüléket a megfelelő energiával.** Ez dupla biztonságot jelent. (Míg az akkumulátoros készülékeknél a 3 vagy 4 évenkénti akkumulátor csere költsége meghaladhatja a nettó 200.000 Ft-ot!).

- Az általunk forgalmazott készüléknél a lítium elemek beszerzése sokkal könnyebb, mint más készülékeknél az akkumulátorok beszerzése, mivel a lítium elemek kereskedelmi forgalomban is kaphatók. 10 db költsége cserével együtt jelenleg nettó 39.000 Ft.
- A ZOLL AED PLUS KÉSZÜLÉK SZOFTVERE FRISSÍTHETŐ, ez az újraélesztési protokoll változásakor nagyon fontos.
- OKTATÓ FUNKCIÓVAL rendelkezik a készülékünk (az eredeti elektróda helyett oktatóskor egy szimulátor szettet csatlakoztatunk, mely megkönnyíti az új, kiképzendő emberek oktatását. A tréning elektróda is ugyanúgy néz ki, mint az eredeti.
- Élethűen gyakorolható a teljes folyamat.
- Kimenthető az újraélesztési adatok.
- DÍJMENTESEN ADUNK HOZZÁ egy hordtáskát.



ZOLL AED Plus defibrillátor

Hirtelen szívhalál esetén szaksegítség a legritkább esetben áll azonnal rendelkezésre, ezért az **alapszintű újraélesztés a rosszullét helyszínén tartózkodó embertársunk feladata. 4-5 perc elmúltával már visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodások alakulnak ki.** Amennyiben az áldozat szíve a mentők riasztásának pillanatában áll, megkezdett **újraélesztés nélkül nincs** reális túlélési **esélye.**

Laikusként is mihamarabb kezdje meg és tartsa fenn mesterségesen az életfunkciókat (jó minőségű mellkaskompresszió), helyezze fel az AED készülék elektródáit és kövesse az utasításokat a mentők kiérkezéséig.

KOMPLETT ÚTVONALTÉRKÉP, TELJESKÖRŰ TÁMOGATÁS AZ ÚJRAÉLESZTÉSHEZ

Egyedülálló grafikus felület – jelzőfények, ábrák, feliratok, hangutasítások – és visszajelzések kombinációja segíti az életmentő minden mozdulatát. A teendők sorrendi végrehajtása biztosított (beleértve, ha szükséges: a gyors defibrillálás lehetőségét).

Egybeépített elektródákkal könnyebb:

A szokásos AED-khez két külön elektróda tartozik. Ez gyorsan pozicionálható és felhelyezhető, vészhelyzetben is egyértelmű. A CPR-D pad szavatossága 5 év (leghosszabb a ma forgalmazott elektródák között).

GYERMEKEK ÚJRAÉLESZTÉSE

Gyermekek újraélesztésére is használható baba kortól.

Ehhez Pedi pad elektródát kell csatlakoztatni (opcionális), a többi készülékhez nem minden esetben lehet vásárolni gyermek elektródát.

A készülék felismeri, hogy gyermek megmentése van folyamatban, a gyermekelektroda csatlakoztatásával gyermekprogramra vált.

A VALÓDI SEGÍTSÉG, INTERAKTÍV VISSZAJELZÉS A MELLKASKOMPRESSZIÓRÓL

Felnőtteknél percenként 100-120 5-6 cm mélységű mellkasnyomás szükséges a megfelelő vér- és oxigénáramlás fenntartása érdekében.

- Adaptív metronóm hangja jelzi a kompressziók ütemét.
- A mellkasnyomás mélységéről hangutasítás tájékoztat („Nyomja le a mellkast erősebben!” vagy „Megfelelő mellkaskompresszió.”).
- A kompresszió mélysége grafikus formában is látható.
- ZOLL AED PLUS figyelmeztet és segít létrehozni a megfelelő mellkasnyomást.

TOVÁBBI CÉLUNK

ISKOLÁKBA, ÓVODÁKBA, MUNKAHELYEKRE, HOTELEKBE, ÉTTERMEKBE, IPARI PARKOKBA, IRODÁKBA, GYÁRAKBA, BEVÁSÁRLÓ KÖZPONTOKBA, AUTÓSZALONOKBA, SZÉPSÉGSZALONOKBA, SPORTEGYESÜLETEKBE, KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOKHOZ ELJUTTATNI A DEFIBRILLÁTORT, ÉS AZ ELSŐSEGÉLY OKTATÁST, HOGY LEGYEN ESÉLYÜNK ÉLETET MENTENI.